


Asennus

1 TÄYTTÄMINEN

TÄYTÄ LÄÄKELUUMEN

laimentamattomalla hepariinilla,
kunnes nestettä tulee ulos
sivuaukoista

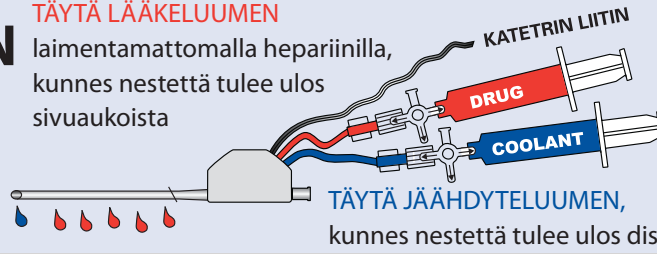

kunnes nestettä tulee ulos distaalipäästä

VAROITUS!

Älä vedä verta
takaisin
lääkeliuveniin

2 ASETTAMINEN



ASETA KATETRI POTILAALLE
(6F tai suurempi sisäänviejäholkki ja 0.035 ohjainvaijeri)



VAROITUS!

Älä käytä pyörivällä
hemostaasiventtiilillä
varustettua asetusholkkia

3 LIITTÄMINEN

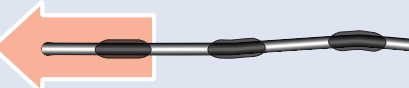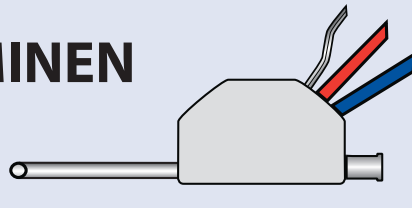

VAIHDA OHJAINVAIJERI
MICROSONIC-LAITTEeseen




VAROITUS!

Älä käytä sisäänviennin
aikana taittunutta
MSD-laitetta

4 PUMPPU

LIITÄ LÄÄKELUUMEN INFUUSIOPUMPPUUN

Aseta infuusio sairaalan
käytännön mukaisesti
Max 35 ml/t
Min 5 ml/t

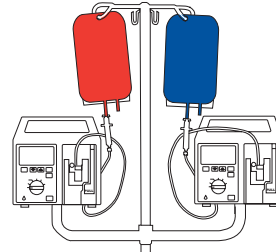

KÄYNNISTÄ INFUUSIOPUMPPU


YHDISTÄ JÄÄHDYTELUUMEN INFUUSIOPUMPPUUN

Aseta infuusio sairaalan
käytännön mukaisesti
Max 120ml/t
Min 35ml/t

5 YHDISTÄMINEN

YHDISTÄ ENDOVASKULAARINEN
LAITE LIITÄNTÄKAAPELIIN



Laitteiden sähköliittimet

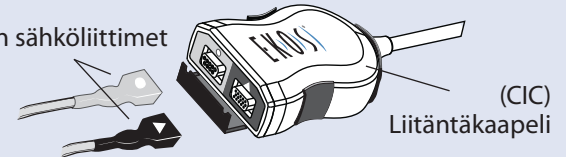

6 KÄYNNISTÄMINEN

KÄYNNISTÄ
OHJAUSYKSIKÖ

PAINA **START**-PAINIKETTA
AKTIVOIDAKSESI
MICROSONIC-LAITTEEN

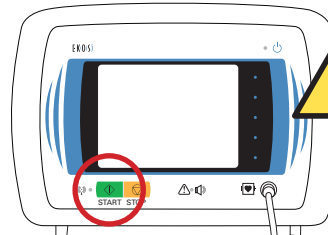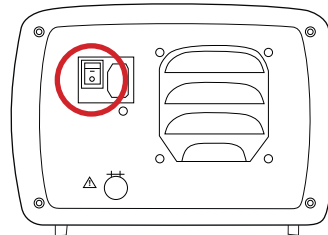

VAROITUS!

SAMMUTA LAITE
ennen microsonic-laitteen
vetämistä ulos
katetrasta

EKOS


EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, USA
425-415-3100
Fax: 425-415-3101
www.ekoscorp.com

Mikäli sinulla on ongelmia
käytön kanssa, soita:


Vianetsintä

OHJAUSYKSIKÖN HÄLYTYKSET


1 Vaimenna
HÄLYTYKSET

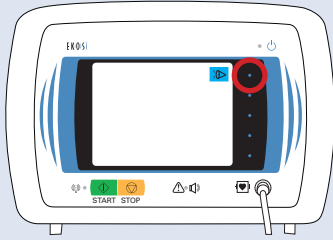

2 Tarkista liitännät

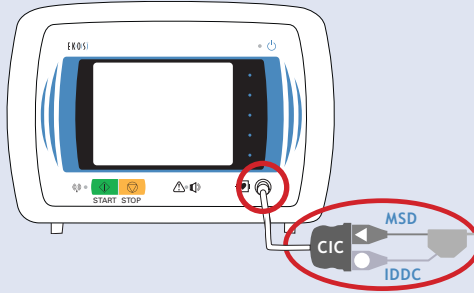


3 Paina **START**
-painiketta

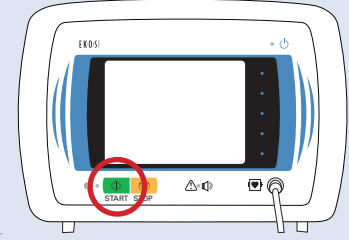


JÄRJESTELMÄ EI KÄYNNISTY UUELLEEN

1 Sammuta ohjausyksikkö
ja käynnistä uudelleen
Yksikön takaosa

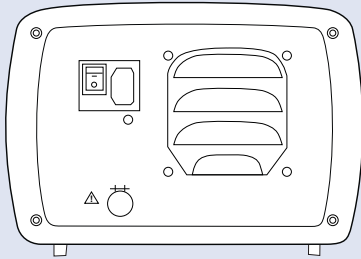


2 Paina
START
-painiketta

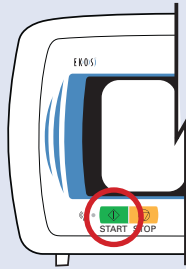

UUELLEENKÄYNNISTYSKEHOTE

1 Paina **START**-painiketta,
mikäli se on tarpeen

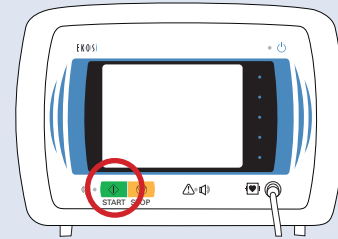

Katso käyttöohjeista: • Kuvakkeiden selitykset
• Vianmäärityksen lisäohjeet

EKOS

EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, USA
425-415-3100
Fax: 425-415-3101
www.ekoscorp.com

*Mikäli sinulla on ongelmia
käytön kanssa, soita:*

CE
0086