


Kurulum

1 DOLDURUN

Sıvı tüm yan portlardan çıkana kadar düz Heparin ile İLAÇ LÜMENİNİ DOLDURUN

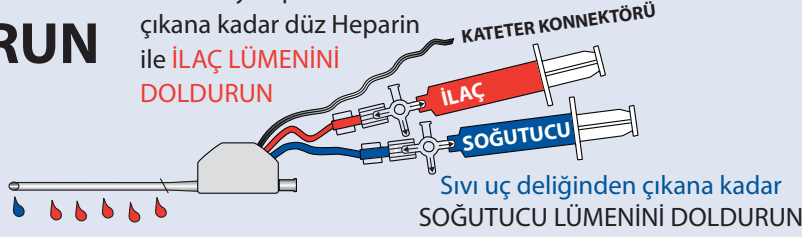

UYARI!

Kanı ilaç lümenine geri çekmeyin



2 KONUMLANDIRIN


KATETERİ HASTADA KONUMLANDIRIN (6F veya daha büyük kılıf ve 0,889 mm (0,035") Kılavuz tel)

UYARI!

Döner hemostaz valfi bir introdüser kılıfı kullanmayın.



3 YERLEŞTİRİN

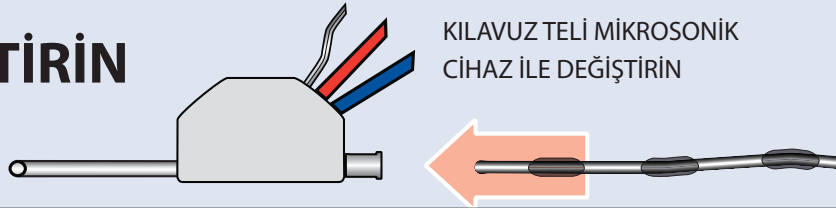

KILAVUZ TELİ MİKROSONİK CİHAZ İLE DEĞİŞTİRİN


UYARI!

Kateter içine yerleşim sırasında bükülen bir mikrosonik cihazı kullanmayın



4 POMPA-LAYIN

İLAÇ LÜMENİNİ İNFÜZYON POMPASINA BAĞLAYIN
Hastane protokolüne göre infüze edin
Maks 35 ml/saat
Min 5 ml/saat

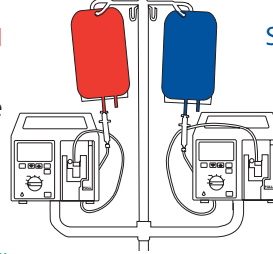


SOĞUTUCU LÜMENİNİ İNFÜZYON POMPASINA BAĞLAYIN
Hastane protokolüne göre infüze edin
Maks 120 ml/saat
Min 35 ml/saat

İNFÜZYON POMPASINI ÇALIŞTIRIN

5 BAĞLAYIN

ENDOVASKÜLER CİHAZ KONNEKTÖR ARABİRİM KABLOSUNA BAĞLAYIN


Cihaz Konnektörleri

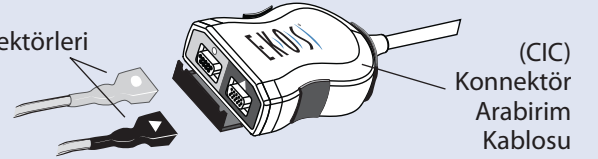

6 ÇALIŞTIRIN

KONTROL ÜNİTESİNİ ÇALIŞTIRIN

MİKROSONİK CİHAZI AKTİVE ETMEK İÇİN START ÜZERİNE BASIN

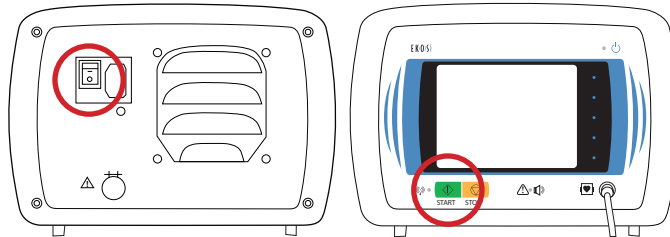

UYARI!

Mikrosonik cihazı kateterden çıkartmadan önce CİHAZI KAPATIN



EKOS


EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, ABD
+1-425-415-3100
Faks: +1-425-415-3101
www.ekoscorp.com

Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, arayın:


Sorun Giderme

KONTROL ÜNİTESİ ALARMLARI


1 ALARMI susturun

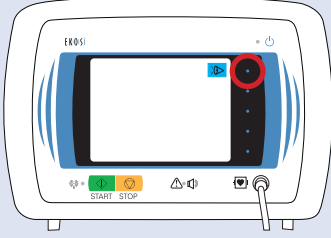

2 Bağlantıları Kontrol Edin

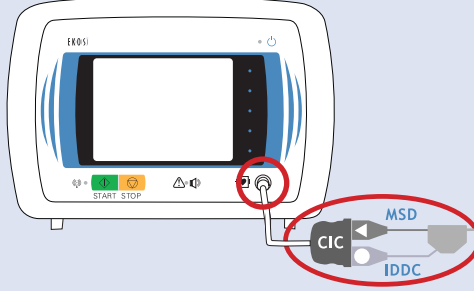


3 START üzerine basın

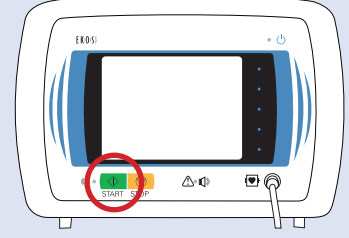


SİSTEM YENİDEN BAŞLAMİYOR

1 Kontrol Ünitesini KAPATIN VE AÇIN Ünitenin arkası

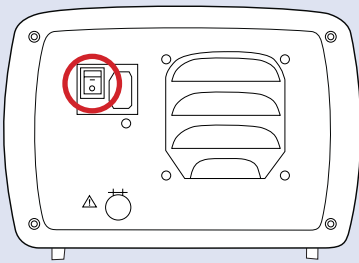


2 START üzerine basın

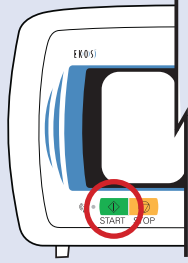

BAŞLATMA HIZLI ALARMI

1 START üzerine basın Gerekirse

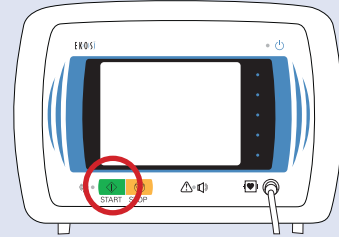

Şunlar için kılavuza bakın: • Uluslararası SİMGE tanımlaması
• İlave sorun giderme

EKOS

EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, ABD
+1-425-415-3100
Faks: +1-425-415-3101
www.ekoscorp.com

Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, arayın:

CE
0086